

## USAGE PRÉVU

Permet l'auto-prélèvement d'un échantillon de sang capillaire à l'aide d'un réservoir de prélèvement compatible qui est expédié à un laboratoire accrédité pour analyse.

## CONTENU DU KIT

- Dispositif de prélèvement sanguin Tasso
- Tube compatible, voir l'étiquetage du fabricant
- Sachet chauffant
- Pansement
- Tampon imbibé d'alcool
- Sachet de retour avec tampon absorbant
- Instructions d'utilisation

## ÉLIMINATION

Suivez les directives locales pour mettre au rebut les objets tranchants usagés ou défectueux en tant que matériaux présentant un risque biologique.

## AVERTISSEMENTS

- Uniquement sur prescription médicale.
- Ne pas utiliser après la date d'expiration.
- À usage unique.
- Conserver hors de portée des enfants.
- De légères ecchymoses ou des marques résiduelles peuvent apparaître sur le site de prélèvement de l'échantillon.
- Ne pas restériliser.
- Ne pas utiliser le produit si la pochette est ouverte ou endommagée.
- Prévu uniquement pour un usage externe.
- Destiné à un usage personnel ou par un professionnel de la santé.
- À utiliser en position assise, étant donné que toute procédure de prélèvement de sang peut entraîner un évanouissement.
- Se référer aux instructions du fabricant pour les composants individuels.
- Ne pas utiliser sur les talons des nourrissons.
- Les utilisateurs doivent valider l'utilisation du produit pour leur test de diagnostic spécifique.

## TRADUCTIONS DES INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- The Tasso+ Kit instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
- Die Gebrauchsanweisung für das Tasso+ Kit und die Übersetzungen finden Sie auf der Tasso-Website:
- Las instrucciones de uso y las traducciones del kit Tasso+ se pueden encontrar en el sitio web de Tasso:
- Le istruzioni per l'uso del kit Tasso+ e le relative traduzioni sono reperibili sul sito Web Tasso:
- Les instructions d'utilisation d'origines du kit Tasso+ ainsi que les traductions correspondantes sont disponibles sur le site web de Tasso:
- De gebruiksaanwijzing voor de Tasso+ Kit en vertalingen zijn beschikbaar op de Tasso website:
- Bruksanvisningen och översättningarna till Tasso+ Kit finns på Tassos webbplats:
- A Tasso+ Kit használati utasítása és annak fordításai megtalálhatók a Tasso weboldalon:
- Návod na použitie a preklady pre sadu Tasso+ nájdete na webovej stránke spoločnosti Tasso:
- Tasso+ -sættets brugsanvisning og oversættelser kan findes på Tassos hjemmeside:
- Bruksanvisninger for Tasso+ Kit og oversættelser findes på Tassos nettsted:
- Tasso+ -setin käyttöohjeet ja käännökset löytyvät Tasson verkkosivuilta:

<https://www.tassoinc.com/eu/tassoplus-kit-ifu>

*Tout incident grave en rapport avec le dispositif doit être signalé au fabricant, au représentant autorisé et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel réside l'utilisateur et/ou le patient.*

## SYMBOLES

**REF** N° de catalogue

**LOT** N° de lot

 À utiliser avant (date)

 À usage unique

 Stocker entre 18 et 25 °C

 Transporter à une humidité ambiante entre 25 et 85 %

 2797 Marque CE

**MD** Dispositif médical

 Consulter les instructions d'utilisation

 Ce dispositif contient des objets tranchants

 Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

**Rx ONLY** Uniquement sur prescription médicale

**STERILE R** Stérilisé par irradiation

 Ne pas restériliser

 Importateur

 Tasso, Inc.  
400 2nd Ave. W  
Seattle, WA 98119 (États-Unis)  
[www.tassoinc.com](http://www.tassoinc.com)

**EC REP** Emergo Europe BV  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
Pays-Bas

 MedEnvoy  
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123  
2595 AM La Haye  
Pays-Bas

PN0763-04, 01



**Kit Tasso+**  
Instructions d'utilisation



# 1. Préparation

Fournitures supplémentaires :

Minuteur

Stylo


Rasoir



1. Lavez-vous les mains avant toute utilisation. Le personnel de santé doit porter des gants pendant le prélèvement.



2. Le dispositif doit être placé sur la partie supérieure du bras. Pour de meilleurs résultats, il convient d'enlever les poils gênants.

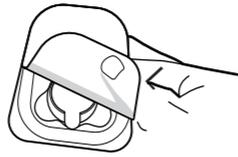

3. Rassemblez tous les éléments nécessaires. Retirez le bouton de l'emballage.




4. Dévissez le bouchon du tube et retirez-le.




5. Enfoncez le tube dans le dispositif jusqu'à ce qu'il soit bien serré et que les lignes de remplissage soient bien visibles, face à vous.

2 min

Augmentation de la circulation sanguine au niveau du site de prélèvement

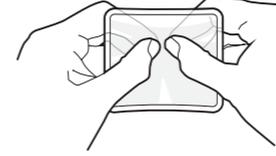

6. Suivez les instructions du sachet chauffant pour l'activer. Si le sachet ne chauffe pas, jetez-le et utilisez l'une de vos mains à la place.

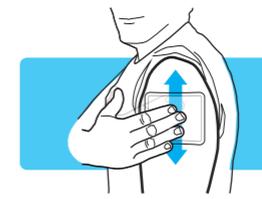

7. Frottez le sachet chauffant ou la main de haut en bas sur l'épaule du patient pendant 2 minutes pour la réchauffer et augmenter la circulation sanguine.



8. Nettoyez la zone avec un tampon imbibé d'alcool et laissez sécher.




9. Retirez le couvercle transparent du bouton rouge.

## 2. Prélèvement

5 min


Il se peut que vous ne sentiez pas le dispositif. Laissez agir 5 minutes OU moins si le sang prélevé atteint la ligne de remplissage.

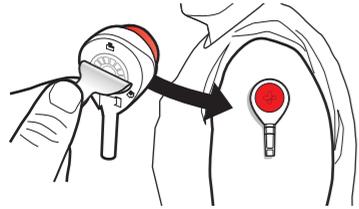

10. Détachez la languette du dispositif et collez le dispositif sur la partie supérieure du bras. Gardez le bras tendu vers le bas sur le côté.



11. Appuyez sur le bouton jusqu'au bout et relâchez-le. Réglez la minuterie sur 5 minutes. Regardez le tube se remplir à l'aide d'un miroir si nécessaire.

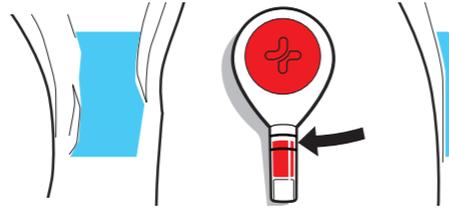

12. Le sang peut ne pas apparaître pendant les 1 à 2 premières minutes. Si le sang atteint la ligne supérieure avant la fin du temps imparti, retirez le dispositif sans attendre. Sinon, attendez la fin des 5 minutes. Ne remplissez pas le tube au-delà de la ligne supérieure !



13. Retirez le dispositif en le décollant d'un côté. Si nécessaire, appliquez le pansement fourni.



14. Retirez le tube du dispositif en le tournant légèrement et en le tirant vers le bas.



15. Mettez le bouchon sur le tube en le serrant à fond.




16. Retournez doucement le tube 10 fois pour mélanger le sang. Tapotez sur le tube pour faire bouger le sang. Tout gel présent au fond du tube ne se mélangera pas au sang.

## 3. Envoi




17. Inscrivez la date de naissance de l'utilisateur (JJ/MM/AAAA) sur l'étiquette du tube dans l'espace situé au-dessus du code-barres.

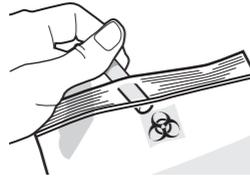

18. Placez le tube dans le sachet de retour transparent et pressez-le pour le sceller. Ne retirez pas le tampon.



19. Inscrivez l'heure et la date sur l'étiquette du sachet de retour.

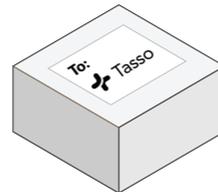

20. Si vous envoyez l'échantillon de sang à un laboratoire par colis, suivez les instructions d'expédition fournies.



21. Suivez les directives locales pour mettre au rebut les matériaux usagés.



22. Lavez-vous les mains après utilisation.



Vous utilisez Tasso pour la première fois ? Scannez le code QR pour accéder à notre vidéo d'instruction ou entrez l'URL ci-dessous dans votre navigateur web :

[www.tasso.com/tassoplus-video](http://www.tasso.com/tassoplus-video)  
Contactez-nous si vous avez besoin d'aide :  
+1 800-257-2370