

URČENÝ ÚČEL

Umožňuje samostatný odber vzorky kapilárnej krvi v spojení s kompatibilným zásobníkom na odber vzorky, ktorá sa zasiela na analýzu do akreditovaného laboratória.

OBSAH SADY

- Zariadenie Tasso na odber krvi
- Kompatibilná skúmavka, pozri označenie výrobcu
- Zahrievacia podložka
- Obväz
- Alkoholový tampón
- Vratné vrečko s absorpčnou podložkou
- Návod na použitie

LIKVIDÁCIA

Dodržiavajte miestne pokyny na likvidáciu použitých alebo poškodených ostrých predmetov ako biologicky nebezpečného materiálu.

VÝSTRAHY

- Len na predpis.
- Nepoužívajte po dátume spotreby.
- Len na jedno použitie.
- Udržujte mimo dosahu detí.
- Na mieste odberu vzorky sa môžu vyskytnúť drobné modriny alebo zvyškové nečistoty.
- Nesterilizujte opakovane.
- Nepoužívajte, ak bol obal zariadenia otvorený alebo poškodený.
- Len na vonkajšie použitie.
- Určené na samostatné použitie alebo použitie poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
- Používajte v sede, pretože pri akomkoľvek odbere krvi môže dôjsť k mdlobám.
- Pozrite si pokyny výrobcu pre jednotlivé komponenty.
- Nie je určené na použitie na detské päty.
- Používatelia musia overiť použitie produktu pre svoju špecifickú diagnos tickú analýzu.

PRELOŽENÉ POKYNY

- The Tasso+ Kit instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
- Die Gebrauchsanweisung für das Tasso+ Kit und die Übersetzungen finden Sie auf der Tasso-Website:
- Las instrucciones de uso y las traducciones del kit Tasso+ se pueden encontrar en el sitio web de Tasso:
- Le istruzioni per l'uso del kit Tasso+ e le relative traduzioni sono reperibili sul sito Web Tasso:
- Les instructions d'utilisation d'origines du kit Tasso+ ainsi que les traductions correspondantes sont disponibles sur le site web de Tasso:
- De gebruiksaanwijzing voor de Tasso+ Kit en vertalingen zijn beschikbaar op de Tasso website:
- Bruksanvisningarna och översättningarna till Tasso+ Kit finns på Tassos webbplats:
- A Tasso+ Kit használati utasítása és annak fordításai megtalálhatók a Tasso weboldalon:
- Návod na použitie a preklady pre sadu Tasso+ nájdete na webovej stránke spoločnosti Tasso:
- Tasso+ -sættets brugsanvisning og oversættelser kan findes på Tassos hjemmeside:
- Bruksanvisninger for Tasso+ Kit og oversættelser findes på Tassos nettsted:
- Tasso+ -setin käyttöohjeet ja käänökset löytyvät Tasson verkkosivuilta:

<https://www.tassoinc.com/eu/tassoplus-kit-ifu>

Akýkoľvek závažný incident, ktorý sa vyskytol v súvislosti so zariadením, sa musí nahlásiť výrobcovi, autorizovanému zástupcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ a/alebo pacient sídlo.

ZNAČKY

REF Katalógové číslo

LOT Číslo šarže

Dátum spotreby

Len na jedno použitie

Uschovajte pri 18 – 25 °C

Prepravujte pri relatívnej vlhkosti 25 – 85 %

CE 2797 CE označenie

MD Zdravotnícke zariadenie

Prečítajte si návod na použitie

Toto zariadenie obsahuje ostré predmety

Ak je balenie poškodené, zariadenie nepoužívajte

Rx ONLY Len na predpis

STERILE R Sterilizované ožiarením

Nesterilizujte opakovane

Importér

Tasso, Inc.
400 2nd Ave. W
Seattle, WA 98119 USA
www.tassoinc.com

EC REP Emergo Europe BV
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Holandsko

MedEnvoy
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
Holandsko

PN0763-16, 01

Tasso

Sada Tasso+
Návod na použitie



1. Príprava

Doplňkové potreby:

Časomera




Pero



Žiletka



1. Pred použitím si umyte ruky. Zdravotnícki pracovníci musia mať počas odberu nasadené rukavice.

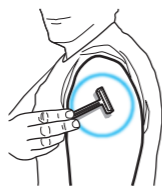

2. Zariadenie sa umiestni na rameno - na dosiahnutie najlepších výsledkov odstráňte všetky prebytočné chlčky.



3. Zhromaždíte všetky potrebné položky. Vyberte tlačidlo zo zásobníka.



4. Otočte a odstráňte uzáver zo skúmavky.




5. Zatláče skúmavku do zariadenia, až kým nebude tesne priliehať k plniam čiarám smerujúcim von.




Zvýšenie prietoku krvi v mieste odberu



6. Pri aktivácii zahrievacej podložky postupujte podľa pokynov. Ak sa podložka nezahrieva, odstráňte ju a požadované miesto zahrejte ručne.

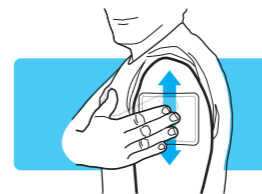

7. Požadované miesto zahrejte súchaním zahrievacej podložky alebo ruky smerom hore a dole na rameno používateľa počas 2 minút, aby ste ho zahriali a zvýšili prietok krvi.

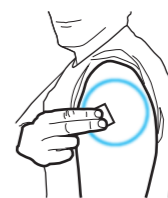

8. Očistite oblasť alkoholovým tampónom a nechajte zaschnúť.




9. Odstráňte priehľadný kryt z červeného tlačidla.

2. Odber




Zariadenie nemusíte cítiť. Nechajte pôsobiť 5 minút ALEBO menej, ak krv dosiahla plniam čiaru.

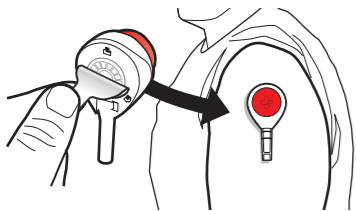

10. Odlepte nálepku od zariadenia a prilepte zariadenie na rameno. Ruku nechajte visieť rovno dole.



11. JEDENKRÁT stlačte tlačidlo úplne nadol a uvoľnite ho. Nastavte časovač na 5 minút. Podľa potreby sledujte napíňanie skúmavky pomocou zrkadla.

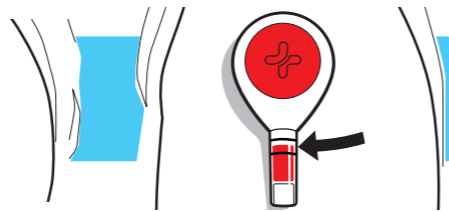

12. Krv sa nemusí objaviť počas prvých 1 - 2 minút. Ak krv dosiahne hornú čiaru naplnenia pred uplynutím času, zariadenie odstráňte po uplynutí celkovo 5 minút alebo skôr. Neplňte nad hornú čiaru!



13. Odstráňte zariadenie odlúpnutím z jednej strany. V prípade potreby použite priložený obväz.



14. Skúmavku odstráňte zo zariadenia miernym pootočením a potiahnutím nadol.



15. Uzáver úplne zacvaknite na skúmavku.




16. jemne prevráťte skúmavku 10-krát, aby sa krv premiešala. Ťuknite na skúmavku alebo ňou potraсте, aby sa krv rozhybala. Žiadny gél na dne skúmavky sa nezmieša s krvou.


3. Odoslanie




17. Napíšte dátum narodenia používateľa (DD/MM/RRRR) na štítok skúmavky do priestoru nad čiarovým kódom.

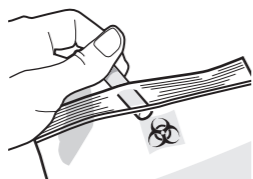

18. Vložte skúmavku do priehľadného vratného vrečka a stlačte ho, aby sa uzavrel. Neodstraňujte podložku.

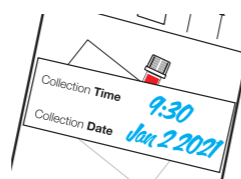

19. Zaznamenajte čas a dátum na štítku vratného vrečka.

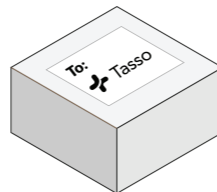

20. Ak vraciate vzorku krvi do laboratória prostredníctvom zásielkovej služby, postupujte podľa poskytnutých pokynov na prepravu.



21. Dodržiavajte miestne pokyny na likvidáciu použitých materiálov.



22. Po použití si umyte ruky.



Používate zariadenie Tasso prvýkrát? Naskenovaním kódu QR získate prístup k nášmu inštruktážnemu videu alebo zadajte nižšie uvedenú adresu URL do webového prehliadača:

www.tassoinc.com/tassoplus-video

Kontakt v prípade otázok: +1 800 257 2370