


TASSO-M20

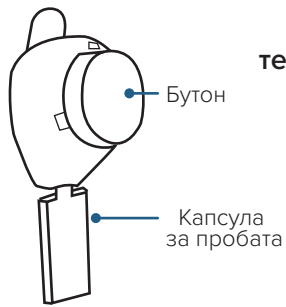


ВИДЕО

ПЪРВА УПОТРЕБА


Насочете камерата на телефона си тук, за да гледате

видеото:

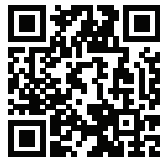

или посетете
www.tassoinc.com/tasso-m20-video

ПОДГОТОВКА

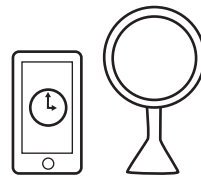

1. Подгответе таймер и огледало.

Ще Ви трябват за вземането на пробата.




2. Разтъркайте ръката бързо и силно точно под рамото.

Загрейте добре, за да подобрите кръвообращението.




3. Почистете мястото с тампон със спирт.

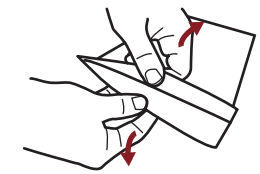


4. Отворете пликчето на устройството като разделите белия и прозрачния слой.

ВЗЕМАНЕ НА ПРОБАТА

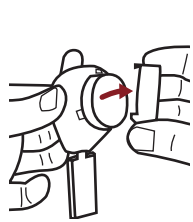

5. Свалете прозрачното пластмасово капаче над червения бутон.

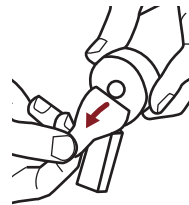

6. Отлепете хартиената лепенка зад червения бутон.

Капсулата за пробата трябва да сочи надолу.




7. Залепете устройството върху рамото.

След като сте го поставили, не го сваляйте.




8. Натиснете бутона бързо и силно, докрай. Изчакайте две секунди, след което го пуснете.

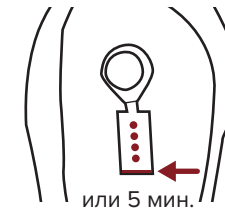

9. Включете таймера за пет минути.

Дръжте ръката си отстрани и следете запълването на точките в огледало. Кръвта не се вижда веднага.

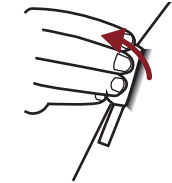


10. След пет минути или по-рано, ако кръвта се появи на дъното на капсулата, отлепете устройството.

ВРЪЩАНЕ




11. Отлепете прозрачната лента, за да се покаже отворът на капсулата за пробата.

Поставете етикета с баркода към задната част на капсулата, ако е предоставен такъв.

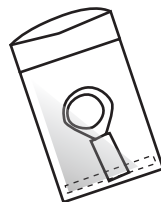

12. Поставете устройството в пластмасовата торбичка за връщане и я запечатайте.

Оставете пликчетата за влага в торбичката.

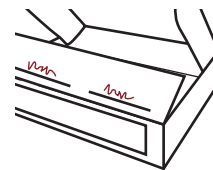

13. Впишете датата и часа на вземането на проба върху вътрешната страна на капача на кутията.



14. Поставете торбичката в кутията и затегнете с лентата.



15. Следвайте предоставените инструкции за връщане на пробата в лабораторията.



УКАЗАНИЕ ЗА УПОТРЕБА

TASSO ONDEMAND

TASSO-M20

€ 2797



За помощ се свържете с нас:
1-800-257-2370



- Преведени указания**
- The Tasso-M20 instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
 - Die Gebrauchsanweisungen für Tasso M20 und Übersetzungen finden Sie auf der Tasso-Website:
 - Las instrucciones de uso del Tasso-M20 y las traducciones se pueden encontrar en el sitio Web de Tasso:
 - Le mode d'emploi du Tasso-M20 et ses traductions sont disponibles sur le site web de Tasso:
 - De gebruiksinstructies en vertalingen voor de Tasso-M20 vindt u op de Tasso-website:
 - Användningsinstruktioner och översättningar för Tasso-M20 finns på Tassos webbplats:
 - As instruções de uso do Tasso-M20 e as traduções estão disponíveis no site da Tasso:
 - Instrukcję obsługi Tasso-M20 oraz tłumaczenia można znaleźć na stronie internetowej Tasso:
 - Указанията за употреба и преводите на Tasso-M20 могат да бъдат намерени на Интернет страницата на Tasso:
 - Návod k použití a překlady Tasso-M20 najdete na webové stránke Tasso:
 - Tasso-M20 használati útmutatója és annak fordítása megtalálható a Tasso weboldalon:
 - Tasso-M20の使用方法と翻訳は、Tasso社のウェブサイトに掲載されています:
 - Tasso-M20使用说明和译文可在Tasso网站上找到:
 - Инструкция в експлуатации до Tasso-M20 ризними мовами знаходиться на веб-сайті компанії Tasso:
 - Инструкция по эксплуатации к Tasso-M20 на разных языках находится на веб-сайте компании Tasso:
- <https://www.tassoinc.com/tasso-m20-ifu>

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Tasso-M20 е предназначено за вземане, съхраняване и пренасяне на капилярна кръв за изследване в централизирана лаборатория. Той се използва в извън клинични условия, за употреба от възрастни лица.

ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Tasso-M20 е стерилно, еднократно, интегрирано устройство за вземане на кръвна проба. То се състои от бутон и капсула за проба. Бутонът е покрит с лепкава се отстраняема преди вземането на пробата. След вземането на пробата, устройството се доставя в централизирана лаборатория за изследване. В комплекта е предоставена торбичка за връщане с абсорбираща подложка.

ПРИНЦИПИ НА ДЕЙСТВИЕ

При вземането на пробата устройството се поставя върху кожата в горната част на ръката за няколко минути. Стерилна игла пробива кожата, а бутонът изтегля капилярна кръв в капсулата за пробата с помощта на вакуум. След отпедлен период от време или, когато капсулата за пробата е пълна, устройството се отстранява и се изпраща в лабораторията. По време на използването следвайте подробните указания.

СЪРЪЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

Устройство за вземане на кръв Tasso
Тампон със спирт
Лепенка
Торбичка за връщане с абсорбираща подложка

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• Не използвайте върху пети на бегета.

ИЗВЪРЛЯНЕ

Дефектни устройства следва да се изхвърлят съгласно местните или държавни разпоредби за депониране на използвани остри предмети.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Използвайте само по лекарско предписание.
- Използване за ин-витро диагностика.
- Не стерилизирате повторно.
- Не използвайте, аколикнето е отворено или скъсано.
- Не използвайте след изтичането на срока на годност.
- За еднократна употреба.
- Около мястото на убождането може да се появи лек хематом.
- Използвайте докато седите, тъй като по време на вземането на кръв може да Ви се завие свят.
- Спазвайте унинверсалните биологични предпазни мерки.
- Пазете на място недостъпно за деца.

СИМВОЛИ

Каталожен номер **REF**

Партиден номер **LOT**

Използвайте преди



Вижте указанията за употреба



Устройството съдържа остри части



Не използвайте, ако целостта на опаковката е нарушена



За еднократна употреба

Не стерилизирате повторно



Биологичен диск



Съхранявайте при температура 18-28°C



Транспортирайте при относителна влажност 25-85%



Маркировка „CE“



Употреба само по лекарско предписание



Стерилизирано чрез облъчване



Вносител