



TASSO-M20

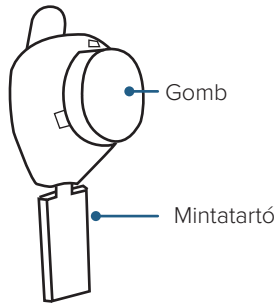

VIDEÓ


HASZNÁLAT ELSŐ ALKALOMMAL

A telefon kamerájával olvassa be a kódot:

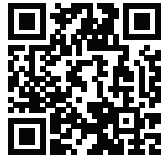

vagy tekintse meg a videót
www.tassoinc.com/tasso-m20-video

ELŐKÉSZÜLETEK

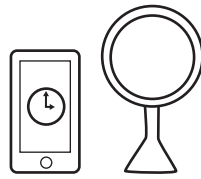

1. Készítsen elő egy időmérőt és egy tükröt.

Ezekre szüksége lesz a vérértelhez.




2. Dörzsölje meg a karját a vállá alatt gyors mozdulatokkal és határozottan.

A jó vérkeringés érdekében dörzsölje egészen, amíg a karja felforrósodik.




3. Törölje meg a karját az alkoholos törlőkendővel.

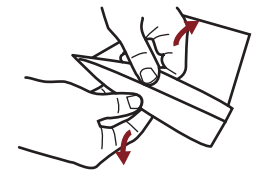


4. Nyissa ki az eszköz zacskóját a fehér és az átlátszó oldal széthúzásával.

VÉRVÉTEL

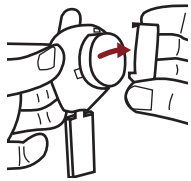


5. Távolítsa el a piros gomb átlátszó műanyag kupakját.

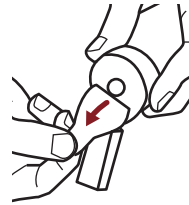

6. Húzza le a papírvédőt a piros gomb hátsó oldaláról.

A mintatartó maradjon lefelé mutató függőleges irányban.

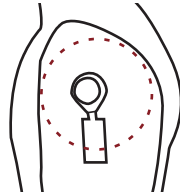


7. Tapassa az eszközt a vállához.

A felhelyezés után ne mozgassa el.




8. Röviden és határozottan nyomja be teljesen a gombot. Várjon két másodpercet, majd engedje el.

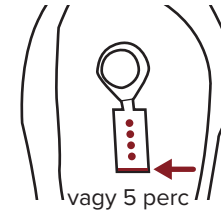

9. Indítsa el az öt percre beállított időmérőt.

Tartsa leengedve a karját, és a tűkör segítségével figyelje, ahogy a pontok vérrel telítődnek. A vér nem látszik azonnal.

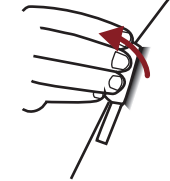


10. Öt perc elteltével, vagy ha a vér megjelenik a mintatartó alsó részén, válassza le az eszközt.

VISSZAKÜLDÉS




11. A mintatartó nyílásának a felszabadításához húzza le az átlátszó fóliát.

Ha van, a vonalkód-címkét ragassza a mintatartó hátuljára.

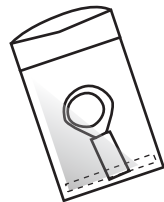

12. Helyezze az eszközt a visszaküldésre szolgáló zacskóba, és ragassza azt le.


A nedvességszívó tasakokat hagyja a zacskóban.

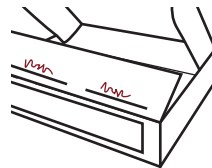

13. Jegyezze fel a mintavétel napját és időpontját a doboz belső oldalára.



14. Helyezze a zacskót a dobozba, és zárja le a szalaggal.

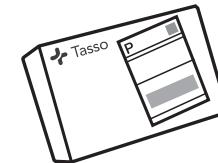

15. A mintának a laborba való visszaküldéséhez kövesse a megadott utasításokat.

TASSO ONDEMAND

TASSO-M20



Ha segítségre van szüksége,
vegye fel velünk a kapcsolatot:
1-408-708-8451



A lefordított használati útmutató use and translations can be found on the Tasso website:

- Die Gebrauchsanweisungen für Tasso M20 und Übersetzungen finden Sie auf der Tasso-Website:
- Las instrucciones de uso del Tasso-M20 y las traducciones se pueden encontrar en el sitio Web de Tasso:
- Le istruzioni per l'uso di Tasso-M20 e le relative traduzioni sono reperibili sul sito web de Tasso:
- Le mode d'emploi du Tasso-M20 et ses traductions sont disponibles sur le site web de Tasso:
- Användningsinstruktioner och översättningar för Tasso-M20 finns på Tassos webbplats:
- As instruções de uso do Tasso-M20 e as traduções estão disponíveis no site da Tasso:
- Instrukcję obsługi Tasso-M20 oraz tłumaczenia można znaleźć na stronie internetowej Tasso:
- Указания за употреба и преводите на Tasso-M20 могат да бъдат намерени на Интернет страницата на Tasso:
- Návod k použití a překlad Tasso-M20 najdete na webové stránce Tasso-Website:
- A Tasso-M20 használati útmutatója és annak fordítása megtalálható a Tasso weboldalon:
- Tasso-M20の使用方法説明書と翻訳は、Tasso社のウェブサイトに掲載されています:
- Tasso-M20使用说明书和译文可在Tasso网站上找到:
- Инструкция по эксплуатации Tasso-M20 на разных языках находится на веб-сайте компании Tasso:
- Návod na použitie zariadenia Tasso-M20 a prekladý nájdete na webovej stránke Tasso.

<https://www.tassoinc.com/tasso-m20-ifu>

Tasso, Inc.
1631 15th Ave., Suite 105
Seattle, WA 98119 USA



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



MedEvoy
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

PN0365-11-03

RENDEL TETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A Tasso M-20 a kapilláris vér begyűjtésére, felnőtteken, nem klinikai körülmények között, történő tesztelésé céljából. Alkalmazása véreket egy központi laboratóriumban tárolására és szállítására használatos, a Tasso M-20 egy steril, eldobható, integrált

AZ ESZKÖZ LEÍRÁSA

- A Tasso-M20 egy steril, eldobható, integrált vérvételi eszköz. Nyomógombból és mintatartóból áll. A gombot levehető kupak védőpapírral. A mintavétel után az eszközt egy központi laboratóriumba küldik elemzésre. A készlet nedvszívó betétet és visszaküldésre szolgáló zacskó tartalmaz.
- A Tasso-M20-at szobahőmérsékleten, 18 °C és 28 °C (64 °F és 82 °F) között kell tárolni, és a szavatossági idő lejártáig használható. A mintákat környezetet hőmérsékleten kell visszaküldeni a készletben található csomagolóanyagok felhasználásával.
- Kizárólag egyszeri használatra. Után.
- A mintavétel helyén előfordulhat kisebb szűzódás.
- Újve használja, mivel bármilyen vérvétel esetén előfordulhat rosszullet.
- Tartsa be az átlátszó biológiai kockázati óvintézkedéseket.
- Gyermekektől elzárva tartandó.

AZ ESZKÖZ MŰKÖDÉSI ELVE

- A mintavételkor az eszközt néhány percra a felekar bőrére helyezik. Egy steril tüi kilyukasztja a bört, és a gomb vákuum segítségével kapilláris vért szív a mintatartóba. Egy előre meghatározott időtartam vagy a mintatartó feltöltődése után az eszközt eltávolítják és a laboratóriumba küldik. Használat során kövesse a részletes utasításokat.
- Az eszköz és elemeket tartalmaz. Ne használja, ha a csomagolás sérült.
- Kizárólag egyszeri használatra.
- Tilos az újból sterilizálás.
- Szavatossági idő.
- Olvassa el a használati útmutatót.
- Az eszköz és elemeket tartalmaz.
- Ne használja, ha a csomagolás sérült.
- Kizárólag egyszeri használatra.
- Tilos az újból sterilizálás.
- Biológiai kockázat.
- Tárolás 18-28 °C-on.
- Szállítás 25-85% relatív páratartalom mellett.
- CE-jelölés.
- Vényköteles.
- Besugárzással sterilizált.
- Importőr.

A KÉSZLET TARTALMA

Tasso vérvételi eszköz
Alkoholos törölkendő
Ragtapasz
Zacskó a visszaküldéshez, nedvszívó párnával
Használati útmutató

ELEJAVALLATOK

- Cseselemek sarkából való vérvételre nem használható.

ARTALMATLANTÁS

A hibás eszközöket a veszélyes, éles vagy hegyes hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi vagy állami irányelveknek megfelelően kell ártalmatlanítani.

FIGYELMEZTÉSEK

- Vényköteles.
- In vitro diagnosztikai használatra.
- Tilos az eszköz újból sterilizálása.
- Ne használja, ha a tasakot felfújtották vagy a csomagolás sérült.
- Ne használja a szavatossági idő lejártá után.
- Kizárólag egyszeri használatra.
- A mintavétel helyén előfordulhat kisebb szűzódás.
- Újve használja, mivel bármilyen vérvétel esetén előfordulhat rosszullet.
- Tartsa be az átlátszó biológiai kockázati óvintézkedéseket.
- Gyermekektől elzárva tartandó.

JELÖLÉSEK

REF Katalógusszám

LOT Tételszám

Szavatossági idő



Olvassa el a használati útmutatót



Az eszköz és elemeket tartalmaz



Ne használja, ha a csomagolás sérült



Kizárólag egyszeri használatra



Tilos az újból sterilizálás



Biológiai kockázat



Tárolás 18-28 °C-on



Szállítás 25-85% relatív páratartalom mellett.



CE-jelölés



Vényköteles



Besugárzással sterilizált



Importőr