


## TASSO-M20

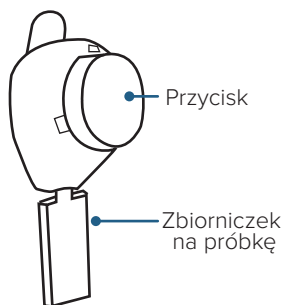

## WIDEO


### POCZĄTKUJĄCY UŻYTKOWNIK

Skieruj tutaj aparat  
telefonu, żeby obejrzeć:



lub przejdź do  
[www.tassoinc.com/tasso-m20-video](http://www.tassoinc.com/tasso-m20-video)

## PRZYGOTUJ

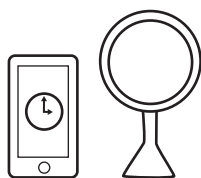

### 1. Przygotuj minutnik i lustro.

Będziesz ich potrzebować podczas pobierania próbki.



### 2. Potrzyj ramię szybkim i zdecydowanym ruchem tuż poniżej barku.

Pocieraj tak długo, aż ramię będzie bardzo ciepłe, aby wspomóc przepływ krwi.




### 3. Odkaż ramię wacikiem nasączonym alkoholem.




### 4. Otwórz woreczek urządzenia, rozchylając białe i przezroczyste warstwy.

## POBRANIE

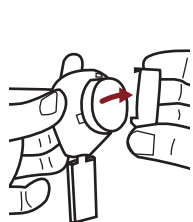


### 5. Ściągnij przezroczystą plastikową osłonę z czerwonego przycisku.

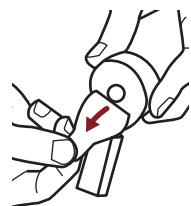

### 6. Zerwij papierowy znacznik z tyłu czerwonego przycisku.

Trzymaj zbiorniczek na próbkę skierowany w dół.

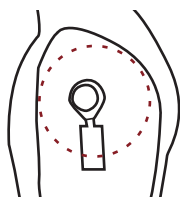


### 7. Przyklej urządzenie do ramienia.

Nie usuwaj po przyklejeniu.



### 8. Przyciśnij przycisk mocnym i zdecydowanym ruchem, aż nie będzie dalej wchodził. Odczekaj dwie sekundy i puść.

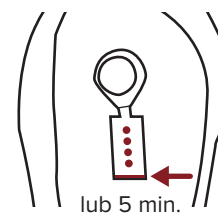

### 9. Ustaw minutnik na 5 minut.

Trzymaj ramię przy boku ciała i obserwuj w lusterku, jak wypełniają się kropki. Nie od razu będzie widać krew.




### 10. Po pięciu minutach lub wcześniej, jeżeli na dole zbiorniczka pojawi się krew, odklej urządzenie.

## ZWROT




### 11. Odklej przezroczystą folię, aby odsłonić zawór zbiorniczka na próbkę.

Jeśli dostarczono etykietę z kodem paskowym, umieścić ją na tylnej stronie zasobnika.

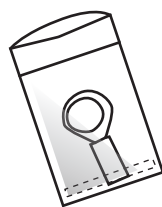

### 12. Umieść urządzenie w zwrotnej torebce foliowej i zamknij.

Zostaw regulatory wilgotności w torebce.

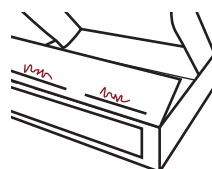

### 13. Zapisz datę i godzinę pobrania próbki na wewnętrznej klapie pudełka.



### 14. Włóż torebkę do pudełka i zamknij paskiem.



### 15. Wykonać dostarczone instrukcje w celu zwrócenia próbki do laboratorium.



**ISTRUKCJA OBSLUGI**

**TASSO ONDEMAND**  
**TASSO-M20**

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy  
1-408-708-8451



- Przetłumaczone instrukcje**
- The Tasso-M20 instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
  - Die Gebrauchsanweisungen für Tasso M20 und Übersetzungen finden Sie auf der Tasso-Website:
  - Las instrucciones de uso del Tasso-M20 y las traducciones se pueden encontrar en el sitio Web de Tasso:
  - Le istruzioni per l'uso di Tasso-M20 e le relative traduzioni sono reperibili sul sito web di Tasso:
  - Le mode d'emploi du Tasso-M20 et ses traductions sont disponibles sur le site web de Tasso:
  - De gebruiksinstructies en vertalingen voor de Tasso-M20 vindt u op de Tasso-website:
  - Användningsinstruktioner och översättningar för Tasso-M20 finns på Tassos webbplats:
  - As instruções de uso do Tasso-M20 e as traduções estão disponíveis no site da Tasso:
  - Instrukcje obsługi Tasso-M20 oraz tłumaczenia można znaleźć na stronie internetowej Tasso:
  - Указания за употреба и преводите на Tasso-M20 могат да бъдат намерени на Интернет страницата на Tasso:
  - Návod k použití a překlady najdete na webové stránce Tasso:
  - Инструкция по эксплуатации к Tasso-M20 на разных языках находится на веб-сайте компании Tasso:
  - Инструкція з експлуатації до Tasso-M20 різними мовами знаходиться на веб-сайті компанії Tasso-M20
  - Tasso-M20 使用说明书和译文可在 Tasso 网站上找到:
  - Tasso-M20 の使用説明書と翻訳は、Tasso 社のウェブサイトに掲載されています:
  - A Tasso-M20 használati útmutatója és annak fordítása megtalálható a Tasso weboldalon:
- <https://www.tassoinc.com/tasso-m20-ifu>

**PRZEMACZENIE**

Tasso-M20 służy do pobierania, przechowywania i transportowania krwi włośniczkowej do badania w scentralizowanym laboratorium. Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w środowisku nieklinicznym przez osoby dorosłe.

**OPIS URZĄDZENIA**

Tasso-M20 to sterylne, jednorazowe, zintegrowane urządzenie do pobierania próbek. Składa się ono z przycisłki i zbiorniczka na próbkę. Przycisłka znajduje się pod podjęmwaną osłonką. Przed pobraniem próbki należy zerwać papierowy rewers. Po odebraniu próbki urządzenie zostanie odesłane do centralnego laboratorium w celu przeprowadzenia analizy. W zestawie znajduje się forebka zwrotna wraz z chłonnym wkładem.

**PRZECIHWYMANIE I STABILNOŚĆ**

Urządzenie Tasso-M20 należy przechowywać w temperaturze pokojowej, od 18°C do 28°C (64°F – 82°F) i można go używać do upływu daty ważności. Probki są wysyłane w temperaturze otoczenia przy użyciu dostarczonych materiałów przeczyszczających do zrealizowania wysyłki.

**ZASADY DZIAŁANIA**

Podczas pobierania próbki urządzenie umieszcza się na kilka minut na skórze w górnej części ramienia. Sterylna igła przekłuwającą skórę, a Przycisłka powoduje pobranie krwi wa skórze, a Zbiorniczka na próbkę za pomocą podciśnienia. Po upływie określonego czasu lub kiedy Zbiorniczka na próbkę jest pełny, urządzenie zdejmuje się i odsyła do laboratorium. Podczas używania należy przestrzegać stosownych wskazówek.

**ZAWARTOŚĆ ZESTAWU**

Urządzenie do pobrania próbki krwi Tasso  
Wacik nasączony alkoholem  
Bandaż  
Forebka zwrotna z wkładem chłonnym  
Instrukcje użycia

**PRZECIHWYSKAZANIA:**

• Nie do stosowania na pięcie niemowlęcia.

**UWAGI I OSTRZEŻENIA**

Wadliwe urządzenie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi lub krajowymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji użytych ostrych narzędzi.

**UWAGI I OSTRZEŻENIA**

- Wyłącznie na receptę.
- Do stosowania w diagnostyce in-vitro.
- Nie sterylizować.
- Nie używać, jeżeli opakowanie zostało otwarte lub jest uszkodzone.
- Nie używać po upływie daty ważności.
- Do jednorazowego użytku.
- W obrębie miejsca pobrania próbki mogą powstawać niewielkie siniaki.
- Używać w pozycji siedzącej, ponieważ podczas każdej procedury pobrania krwi może dojść do omdlenia.
- Przestrzegać uniwersalnych środków ostrożności dotyczących zagrożeń biologicznych.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.

**SYMBOLY**

Numer katalogowy



Numer partii



Data przydatności



Zapoznaj się z instrukcją użycia



To urządzenie zawiera ostre elementy



Nie używać, jeżeli urządzenie jest uszkodzone



Wyłącznie do użytku jednorazowego



Nie sterylizować ponownie



Zagrożenie biologiczne



Przechowywać w temp. 18-28°C.



Transport przy wilgotności względnej 25-85%



Znak CE (Europejski Znak Zgodności)



Wyłącznie na receptę



Sterylizowane poprzez napromienianie



Importer

