


TASSO-M20




НОВІ КОРИСТУВАЧІ
Щоб переглянути,
проскануйте це камерою
свого телефону:

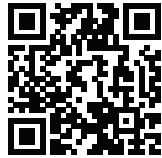

або відвідайте
www.tassoinc.com/tasso-m20-video

ВІДЕО

ПІДГОТОВКА

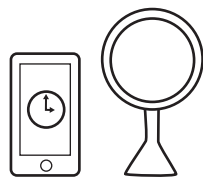

1. Візьміть таймер і дзеркало.

Вони знадобляться під час забору.




2. Швидко та ретельно потріть руку трохи нижче плеча.

Розтирайте, поки це місце не нагріється добре, щоб покращити кровообіг.




3. Протріть руку спиртовою серветкою.

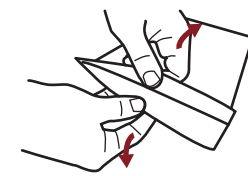


4. Відкрийте подушечку пристрою, розділивши білий та прозорий шари.

ЗАБІР

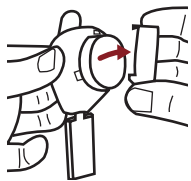

5. Зніміть прозору пластикову наклейку з червоної кнопки.

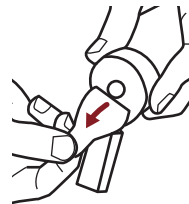

6. Відклейте клаптик паперу з червоної кнопки.

Контейнер для зразку має бути спрямований униз.




7. Прикладіть пристрій до плеча.

Після цього не забирайте.



8. Швидко й упевнено натисніть кнопку до упору. Зачекайте дві секунди й відпустіть.

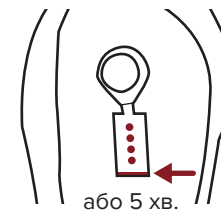

9. Увімкніть п'ятихвилинний таймер.

Тримайте руку біля тіла і стежте за заповненням отворів у дзеркалі. Кров з'явиться не одразу.




10. За п'ять хвилин або раніше, якщо кров з'явиться на дні контейнера, можете відклеїти пристрій.

ПОВЕРНЕННЯ




11. Відклейте прозору плівку, щоб було видно отвір контейнера для зразку.

Наклеювати штрих-код з тильного боку капсули за наявності.

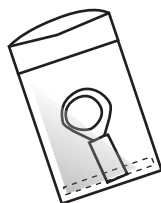

12. Покладіть пристрій у пластиковий пакет та запечатайте.

Залиште мішечки для контролю вологості в пакеті.

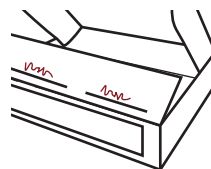


13. Зазначте дату й час забору на внутрішньому відвороті.



14. Покладіть пакет у коробку та заклейте стрічкою.



15. Щоб надіслати ваш зразок до лабораторії, дотримуйтеся вказівок.

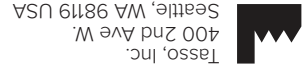

EMERGO EUROPE
Westervoortseidijk 60,
6827 AT Arnhem
The Netherlands



MedEnvoy
Prises Margrijetlaan 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

PN0365-14, 03

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

TASSO ONDEMAND

TASSO-M20

По допомогу звертайтеся до нас: 2797
1-800-257-2370

- ПЕРЕКЛАД ІНСТРУКЦІЇ**
- The Tasso-M20 instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
 - Die Gebrauchsanweisungen für Tasso M20 und Übersetzungen finden Sie auf der Tasso-Website:
 - Las instrucciones de uso del Tasso-M20 y las traducciones se pueden encontrar en el sitio Web de Tasso:
 - Le istruzioni per l'uso di Tasso-M20 e le relative traduzioni sono reperibili sul sito web di Tasso:
 - Le mode d'emploi du Tasso-M20 et ses traductions sont disponibles sur le site web de Tasso:
 - De gebruiksinstructies en vertalingen voor de Tasso-M20 vindt u op de Tasso-website:
 - Användningsinstruktioner och översättningar för Tasso-M20 finns på Tassos webbplats:
 - As instruções de uso do Tasso-M20 e as traduções estão disponíveis no site da Tasso:
 - Instrukcje obsługi Tasso-M20 oraz tłumaczenia można znaleźć na stronie internetowej Tasso:
 - Указання за употреба и преводите на Tasso-M20 могат да бъдат намерени на Интернет страницата на Tasso:
 - Návod k použití a překlady Tasso-M20 najdete na webové stránke Tasso:
 - Tasso-M20 használati útmutatója és annak fordítása megtalálható a Tasso weboldalon:
 - Tasso-M20の使用説明書と翻訳は、Tasso社のウェブサイトに掲載されています:
 - Tasso-M20使用说明和译文可在Tasso网站上找到:
 - Instrukcija z ekspanzijom do Tasso-M20 raznimimi jezicima nalazi se na web-sajtu kompanije Tasso:
 - Instrukcija po ekspanziji k Tasso-M20 na raznych jazykakh nalazitsya na web-sajte kompanii Tasso:
 - Návod na použití zariadenia Tasso-M20 a preklady nájdete na webovej stránke Tasso:

<https://www.tassoinc.com/tasso-m20-ifu>

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Tasso-M20 використовується для збору, зберігання та перевезення каплярної крові з метою проведення аналізів у централізованій лабораторії. Пристрій призначений для використання дорослими в неклінічних умовах.

ОПИС ПРИБОРУ

Tasso-M20 – це стерильний, одноразовий, комплексний пристрій для збору зразків. Він складається з кнопки та контейнера для зразку, кнопка закриття збором необхідні відкрити клаптик паперу. Після збору пристрій належить надіслати до централізованої лабораторії для аналізу. Усереднений пакет для відправлення є гіроскопічний мішечок.

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Tasso-M20 необхідно зберігати при кімнатній температурі 18 °C – 28 °C (64 °F – 82 °F) і можна використовувати до закінчення терміну придатності. Зразки надсилаються в умовах кімнатної температури з використанням матеріалів для відправлення.

ПРИНЦИП ДІЇ

Під час збору зразка пристрій прикладається до шкіри передпліччя на декілька хвилин. Стерильна голка проколює шкіру, а кнопка скеровує каплярну кров у контейнер для зразку за допомогою вакууму. Після зазначеного часу або після заповнення контейнера для зразку пристрій знімається та надсилається до лабораторії.

ВМІСТ НАБОРУ

Пристрій для збору крові Tasso Спиртова серветка
Бинт
Пакет для відправлення з гіроскопічним мішечком
Інструкція з використанням

ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Не використовувати на п'ятах
- Стерилізовано опроміненням новонароджених.

УТИЛІЗАЦІЯ

Несправні пристрої необхідно утилізувати згідно місцевих чи державних правил утилізації стапих гострих предметів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАСЕРЕЖЕННЯ

- Видіється тільки за рецептом.
- Для діагностики тільки в лабораторних умовах.
- Не для повторної стерилізації.
- Не використовувати, якщо подушка була відкрита або пошкоджена.
- Не використовувати, якщо термін придатності скінчився.
- Тільки для одноразового використання. У місці збору зразка може з'явитися невеликий синяць.
- Використовувати в положенні сидячи, тому що процес збору крові може спричинити неприємність.
- Доприпускється стандартні правила утилізації біологічної небезпек.
- Тримайте в недоступному для дітей місці.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Каталогний номер

Номер партії

Використати до

Дивіться інструкцію з використанням

Цей пристрій містить гострі елементи

Не використовувати, якщо упаковку пошкоджено

Тільки для одноразового використання

Не для повторної стерилізації

Біологічна небезпека

Зберігати при 18-28 °C

Провозити за 25-85 % відносно воллості

Знак CE

Видіється тільки за рецептом

Стерилізовано опроміненням



Imported