



1. Használat előtt mosson kezet. Az egészségügyi dolgozóknak kesztyűt kell viselniük a mintavétel során.



2. Vegye ki a gombot a csomagból.



3. Csavarja le a kupakot a kompatibilis csövecskéről.



4. A töltöttségi szintet jelölő vonalakkal kifelé helyezze a csövet a készülékbe, amíg az bekattan.




5. Húzza le a védőfület a piros gombról.



6. Távolítsa el a piros gomb átlátszó kupakját.



7. Készítse elő a vállát. Tapassza az eszközt a megtisztított vállához, és nyomja meg a gombot a mintavétel elindításához.

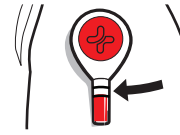

8. Hagyja a csövet 5 percig töltődni. Ha a vér szintje hamarabb eléri a legfelső vonalat, válassza le az eszközt.



9. Húzza le az eszközt az egyik oldalától kezdve.



10. Nyelje csavarással húzza le a csövet a gombról.



11. Pattintsa rá teljesen a kupakot a csőre. Rázza fel a gyártó címkéjének megfelelően.

Ha segítségre van szüksége, vegye fel velünk a kapcsolatot: 1-800-257-2370

LEFORDÍTOTT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- The TassoOne Plus instructions for use and translations can be found on the Tasso website:
- Die Gebrauchsanweisung und die Übersetzungen von TassoOne Plus finden Sie auf der Tasso-Website:
- Las instrucciones de uso de TassoOne Plus y las traducciones se pueden encontrar en el sitio web de Tasso:
- Le istruzioni per l'uso e le traduzioni di TassoOne Plus sono disponibili sul sito Web di Tasso:
- La notice d'utilisation du TassoOne Plus et des versions traduites sont disponibles sur le site Web de Tasso :
- De gebruiksaanwijzing voor de TassoOne Plus en vertalingen zijn te vinden op de Tasso-website:

- Instruktionerna för användning och översättningar tillhörande TassoOne Plus finns på Tassos webbplats:
- A TassoOne Plus használati utasítása és annak fordításai megtalálhatók a Tasso weboldalon:
- Návod na pouzitie a preklady TassoOne Plus nájdete na webovej stránke spoločnosti Tasso:
- TassoOne Plus-brugsanvisninger og -oversættelser findes på Tassos websted:
- TassoOne Plus-bruksanvisningen og -oversættelser finnes på Tasso-nettstedet:
- TassoOne Plus -käyttöohjeet ja käänökset löytyvät Tasson verkkosivuilta:

<https://www.tassoinc.com/eu/tassoone-plus-ifu>

A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSE

A kompatibilis mintagyűjtő tartállyal együtt lehetővé teszi az otthoni kapilláris vérmintavételt.

A CSOMAG TARTALMA

Minden doboz egy TassoOne Plus készüléket tartalmaz.

ÁRTALMATLANÍTÁS

Tartsa be a használt vagy hibás éles és hegyes eszközök biológiailag veszélyes hulladékként történő megsemmisítésére vonatkozó helyi irányelveket.

SZÜKSÉGES ANYAGOK (amit a csomag nem tartalmaz)
















- Kompatibilis cső, lásd a gyártó címkejét
- Kesztyűk (egészségügyi szolgáltatók számára)
- Alkoholos törlőkendő
- Ragtapasz
- Melegítőpárna vagy más karmelegítő módszer

FIGYELMEZTETÉSEK

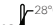- Vényköteles.
- Csak egyszeri használatra.
- Tilos az eszköz újbóli sterilizálása.
- Ne használja, ha a tasakot felnyitották vagy a csomagolás sérült.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- A mintavétel helyén megjelenhet kisebb véraláfutás.
- Ne használja a szavatossági idő lejáta után.
- Saját vagy egészségügyi szolgáltató általi használatra.
- Ülve használja, mivel bármilyen vérvételi eljárásnál rosszul élt előfordulhat.
- Csecsemők sarkából való vérvételre nem használható.
- A felhasználóknak ellenőrizniük kell a termék alkalmasságát az adott diagnosztikai vizsgálathoz.
- Csak külső használatra.

Az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak, a meghatalmazott képviselőjének és a felhasználó és/vagy beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

SZIMBÓLUMOK

- | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|
|  REF | Katalógusszám |  | Olvassa el a használati utasítást |
|  LOT | Tételszám |  | Az eszköz éles végeket tartalmaz |
|  | Szavatossági idő |  | Ne használja, ha a csomagolás sérült |
|  | Csak egyszeri használatra |  | Vényköteles |
|  | Tárolás 18-28 °C-on |  | Besugárással sterilizált |
|  | Szállítás 25-85% relatív páratartalom mellett |  | Tilos az újbóli sterilizálás |
|  | CE-jelölés |  | Orvostechnikai eszköz |
|  | Importálja | | |